

Kinderelektroden Cardiac Science G5 Vollautomaten



Cardiac Science Powerheart G5 Kinderelektroden

Das Powerheart G5 Kinderelektroden-Set ist für die Anwendung an Kinder von 1 - 8 Jahren und leichter als 25 kg geeignet. Sobald die Kinderelektroden an den Defibrillator angeschlossen werden, passt sich das Schockniveau automatisch an.

Bei Kindern wird eine Elektrode auf den Brustkasten und die andere auf dem Rücken befestigt.

Die richtige Platzierung ist sowohl auf der Verpackung als auch auf den Elektroden selbst angegeben.

Haltbarkeit der G5 Kinderelektroden

Auf Grund der leitenden Gelschicht verfügen Elektroden über ein Haltbarkeitsdatum. Nach diesem Datum dürfen die Elektroden nicht mehr verwendet werden, da die Gelschicht austrocknen kann und dadurch die Leitkraft abnimmt. Bitte sorgen Sie dafür, dass dem Defibrillator immer ein Elektrodenpaar mit aktueller Haltbarkeit beiliegt. Die Powerheart G5 Kinderelektroden haben eine Haltbarkeit von ca. 2 Jahren. Das Verfalldatum finden Sie auf einem Aufkleber auf der Rückseite der Elektrodenverpackung.

TECHNISCHE DETAILS DER ELEKTRODEN

- Selbstklebend
- ca. 2 Jahre haltbar
- Aufbewahrungstemperatur zwischen 0°C und 43°C
- Länge des Elektrodenkabels: 130 cm
- können nicht vorkonnetiert werden

Weitere Informationen hier: www.kaiser-tappe.de